


Test Antigenico per COVID-19, risultati in pochi minuti

Prevenire la diffusione grazie ad un test accessibile a tutti


[siemens-healthineers.com/clinitest-covid-antigen](https://www.siemens-healthineers.com/clinitest-covid-antigen)

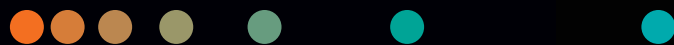

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

Nuovo!
Testa gli individui con o senza sintomi da COVID-19

Il CLINITEST[®] Rapid COVID-19 Antigen Test, con tecnologia lateral flow, distribuito da Siemens Healthineers, è facile da usare e mostra il risultato in soli 15 minuti. Non è richiesto personale di laboratorio qualificato o strumentazione. Il campione nasale può essere raccolto da un operatore sanitario o da un paziente sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario - ovunque e in qualsiasi momento. Se usato come parte di una strategia globale, il test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen può aiutare le comunità a prevenire la diffusione.

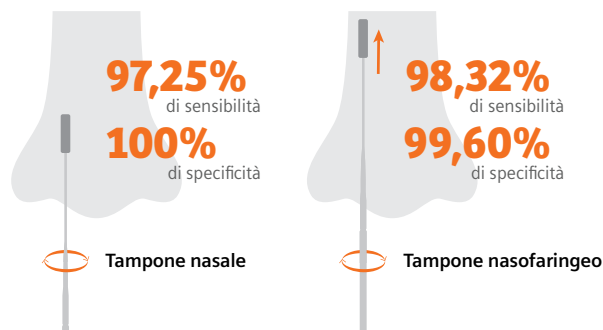

Test Rapido, risultati affidabili

Risultati accurati in soli 15 minuti



Test Scalabile per gestire la salute della popolazione

Testa individui con o senza sintomi di COVID-19, ovunque tu ne abbia più bisogno



Elimina le tradizionali barriere di accesso

Non c'è bisogno di personale di laboratorio o di attrezzature; i campioni nasali possono essere raccolti da un paziente sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario

Informazioni aggiuntive sul prodotto

Le prestazioni cliniche del test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test sono state valutate in sette siti negli Stati Uniti presso i quali i pazienti sono stati arruolati e testati. Lo studio è stato condotto su differenti siti, ambienti clinici e operatori sanitari. I set di dati risultanti per il campionamento nasofaringeo e nasale anteriore sono conformi ai più recenti requisiti della maggior parte delle principali autorità regolatorie e dimostrano prestazioni di alta qualità.

Prestazioni del Tampone Nasofaringeo

Metodo	PCR (Tampone Nasofaringeo)		Risultati Totali	
	Risultati	Positivo		Negativo
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (Tampone Nasofaringeo)	Positivo	117	3	120
	Negativo	2	743	745
Totale				865

Relativa Sensibilità: 98,32% (95% CI: * 94,06% to 99,80%)

Relativa Specificità: 99,60% (95% CI: * 98,83% to 99,92%)

Accuratezza: 99,42% (95% CI: * 98,66% to 99,81%)

**Intervallo di Confidenza*

Prestazioni Tampone Nasale Anteriore

Metodo	PCR (Tampone Nasofaringeo)		Risultati Totali	
	Risultati	Positivo		Negativo
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test (Tampone Nasale)	Positivo	106	0	106
	Negativo	3	128	131
Totale				237

Relativa Sensibilità: 97,25% (95% CI: * 92,17% to 99,43%)

Relativa Specificità: 100% (95% CI: * 97,16% to 100%)

Accuratezza: 98,73% (95% CI: * 96,35% to 99,74%)

**Intervallo di Confidenza*

Specifiche

Tempo per ottenere il risultato: 15 minuti

Tipo di campione: tampone Nasofaringeo
o tampone nasale anteriore

Conservazione: a temperatura ambiente
o refrigerato (2–30°C)

Validità: 24 mesi dalla data di fabbricazione

Antigene rilevato: Nucleocapside

Controlli CLINITEST COVID-19 Antigen

Contenuto del kit: 5 tamponi di controllo negativo (blu) e 5 tamponi di controllo positivo (rosso), tutti sigillati singolarmente

Stoccaggio: Temperatura Ambiente
o refrigerato (2–30°C)

Conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

CLINITEST è un marchio di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il prodotto è sottoposto a revisione della FDA per l'Autorizzazione all'Uso di Emergenza (EUA) e non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare in base al paese. Distribuito da Siemens Healthineers. Per informazioni sulla disponibilità contattare il tuo rappresentante locale. Per ulteriori specifiche e dati sulle prestazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

Sede Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germania
Telefono: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Pubblicazione a cura di

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Telefono: +1 781-269-3000

Contatti locali

Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano, Italia
Telefono: +39 02 243 1
siemens-healthineers.com/it